

Easy TCA® Classic

Einfach und sicher für Gesicht und Körper.

Easy TCA Classic Kit
(12 Peels)

Art.Nr.: AP-02-01

Class III Medical
Device CE1014

Das Easy TCA gilt als das sicherste, effizienteste und einfachste Medium-Peeling der TCA-Serie und ist sehr gut hautverträglich. Eine Pre-Peelvorbereitung ist nicht erforderlich. Des Weiteren findet kein grösserer Eingriff in das tägliche Leben statt. So können Sie nach der Behandlung wie gewohnt Ihrem Tagesablauf nachgehen. Easy TCA wird in bis zu vier, wöchentlichen Sitzungen aufgetragen.

Anwendungsgebiete

- Hautneubildung
- Dychromie
- Akne
- Hyperpigmentierung
- Melasma
- Chloasma
- Keratose
- Feine Fältchen
- Spezielle Behandlungen für Dekolleté, Hände, Unterarme und Schwangerschaftsstreifen
- Verjüngung der Haut
- Raucherhaut

Anwendung

Die betroffene Haut muss nicht vorbereitet werden. Easy TCA wird mit Hilfe von zwei Wattestäbchen bis zur Erlangung weisser Punkte aufgetragen. Während des Auftragens spürt der Patient ein leichtes Wärmegefühl. Sobald die weissen Punkte (cloudy white frosting) erscheinen, muss die Post-Peel Creme aufgetragen werden. Es braucht keine weitere Neutralisation für das TCA. Das Easy TCA Classic kann 4x im Abstand von einer Woche angewendet werden. Die Behandlung sollte währenddessen und danach mit einer Blending Bleaching Creme (Depigmentierung) sowie Cheyla Creme (luventa oder Umida) abgerundet werden.

Empfehlung

- Am Abend nach der Behandlung das Gesicht nicht waschen
- Das Produkt bis zum Morgen auf der Haut wirken lassen
- Nicht in die Sonne gehen und einen starken Sonnenblocker benutzen (Melablock - HSP 50)
- In dem Monat nach der Behandlung zwei Mal am Tag eine Blending Bleaching Cream auftragen

